

3秒以内に測定完了!

ヒーリングアバットメントに
軽く当てるだけ




AnyCheck

ヒーリングアバットメントを除去することなく
インプラント体の安定性を測定



オッセオインテグレーション獲得の程度は、0～99の数値で示されます。数値が高いほど、安定性が高いことになります。

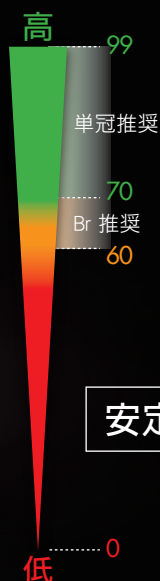

医療機器認証番号：231AFBZI00007000


AnyCheck

AnyCheckはインプラント体の安定性を測定する器具です。
タッピングモーションにより歯槽骨とインプラント界面の剛性を測定し数値化 (IST値) します。IST値を参考に荷重時期の計画を立てることによって、インプラント喪失のリスクを低減することができます。

使用方法



1. 電源ボタンを押します。

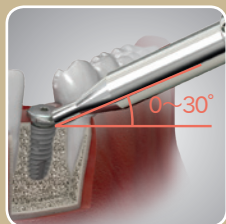

2. ヒーリングアパットメント上部へタッピングロッドをわずかに接触させます。このとき、ヒーリングアパットメントを押さないようにご注意ください。

3. 接触角度を0～30度以内に調整します。

4. 本体を保持しながらスタートボタンを軽く押します。

5. IST値が0～99の範囲で液晶スクリーンに表示されます。数値が高いほど、安定性が高いことになります。



Anycheck の動画はこちらから



注文書

〈ご注文方法〉

注文書に必要事項をご記入のうえ、営業担当者に直接お渡しいただくか、ファックスにてお送りください。

貴医院名			
ご氏名			
ご住所	〒		
TEL		FAX	

商品コード	商品名	価格 (税別)	数量
Y05300010001	Anycheck -エニーチェック-	480,000 円	

営業担当者記入欄

得意先コード	
担当者名	
通信欄	

お問い合わせはこちらまで

--

FAX 送付先 : 06-6325-1012 (和田精密歯研株式会社)